

# BANDAS TENDRE COTON



PAQUETE DE 100 BANDAS DE 7X20 CM

## **CARACTERÍSTICAS:**

FABRICADAS A BASE DE ALGODÓN

SUAVIDAD INIGUALABLE EN EL MOMENTO DEL ARRANCADO

ULTRAFLEXIBLES

EXTRASUAVES

BANDAS NOVEDOSAS

ARRANCADO EXTREMADAMENTE SUAVE CON LAS BANDAS TENDRE COTON: APROBADAS POR EL 100 %

## **BENEFICIOS:**

COMPATIBLES CON TODAS LAS CERAS CON BANDA

PERFECTAS PARA ZONAS AMPLIAS

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

1. RELLENE LA FICHA DE DIAGNÓSTICO CIRÉPIL CON SU CLIENTE.
2. PONGA LA CERA TENDRE COTON EN EL FUNDIDOR HASTA QUE ADQUIERA UNA TEXTURA EXTREMADAMENTE UNTUOSA.
3. COMPRUEBE LA TEMPERATURA SOBRE SU MUÑECA Y LA DE SU CLIENTE.
4. PREPARE LA ZONA QUE VA A DEPILAR CON LA LOCIÓN AZUL PURIFICANTE CIRÉPIL® BY PERRON RIGOT Y COMPRUEBE EL SENTIDO DE CRECIMIENTO DEL VELLO. SI LA PIEL ESTÁ SECA O FRÍA, APLIQUE UNA GOTTA DE ACEITE PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA DEPILACIÓN CIRÉPIL® BY PERRON RIGOT. ATENCIÓN: ESTA CERA SECA MUY RÁPIDO.
5. APLIQUE UNA BANDA TENDRE COTON SOBRE LA ZONA CUBIERTA DE CERA, Y ALISE. TENSE LA PIEL Y DESENROLLE LA BANDA CON RAPIDEZ, EN PARALELO A LA ZONA DEPILADA Y EN SENTIDO CONTRARIO AL CRECIMIENTO DEL VELLO.
6. ANTES DE ARRANCAR LA BANDA EN SENTIDO CONTRARIO AL DEL CRECIMIENTO DEL VELLO, ALÍSELA Y PRESIONE FUERTEMENTE CON LA MANO, PARA FACILITAR LUEGO EL TIRÓN PARALELO A LA PIEL.
7. AL CONCLUIR LA DEPILACIÓN APLIQUE EL PRODUCTO POSDEPILATORIO CIRÉPIL® BY PERRON RIGOT MÁS INDICADO PARA SU CLIENTE.
8. ENTREGUE A SU CLIENTE EL FOLLETO «BUENOS REFLEJOS».

*CONTRAINDICACIÓN:* NO USAR SOBRE PIELES LESIONADAS.